

naropa *NEWS*

KUNDENINFORMATION NAROPA REHA AG

HERBST 2019

MOBILITÄTSLÖSUNGEN

ROLLATOR BIS GEHWAGEN – GROSSE AUSWAHL AN GEHHILFEN SORGT FÜR MOBILITÄT BEI SPEZIELLEN BEDÜRFNISSEN.

Die Palette reicht von Leichtgewichtsrollatoren bis Speziallösungen, die auf verschiedene Erkrankungen oder Symptome zugeschnitten sind. Für die Reise eignet sich besonders das zusammenfaltbare und klappbare Reisemodell mit geräumiger Tasche. Bei Ausflügen in die Natur leistet der Outdoor-Rollator mit extragrossen Rädern gute Dienste.

Gehilfe für jedes Bedürfnis

Für Patienten mit ungenügender Hand- und Armkraft kann der klassische Rollator mit Unterarmauflagen umgerüstet werden. Kann der Rollator nur mit einer Hand bedient werden, lässt sich eine Einhand-Simultanbremse installieren. Der Neuro-Rollator mit seinem reversiblen Bremsensystem RBS, und allenfalls zusätzlichem Rollwiderstand-System, ist ideal für neurologische und alterstypische Erkrankungen. Zum Gehen werden die Bremsen gezogen, sobald man loslässt, stoppt das Gerät. Ein mit einer Laserlinie ausgerüstetes Neuro-Rollatormodell hilft insbesondere Parkinson-Patienten, wieder in Bewegung zu kommen. Der 2-in-1-Rollstuhl-Rollator ist mit wenigen Handgriffen vom Rollator zum Rollstuhl umgebaut und bietet so die benötigte Unterstützung.

2 ROLLATOR EINSTELLEN UND RICHTIG DAMIT GEHEN

3 ZUSATZANTRIEB FÜR DEN ROLLSTUHL

4 UNSERE AKTIONEN IM HERBST

**HERBST
AKTION!**



Für die moderne Bewegungstherapie in Kliniken, Rehaeinrichtungen und Altersheimen wurde der Gehwagen TOPRO Taurus entwickelt. Er entlastet den Oberkörper, den Rücken oder das Knie und hilft bereits beim Aufstehen.

Die Naropa Reha unterstützt Sie bei der Wahl der richtigen Gehhilfe. Steht in Ihrer Einrichtung die Neuanschaffung von Rollatoren an, erstellen wir gern eine unverbindliche Offerte. Beachten Sie auch unsere Herbstaktion auf der letzten Seite. Unsere kompetente Werkstatt kümmert sich um Service und Reparaturen.

SO IST ES RICHTIG

OPTIMALER GANG UND GESUNDE KÖRPERHALTUNG: DEN ROLLATOR EINSTELLEN UND RICHTIG GEHEN

Die richtige Höhe ist entscheidend: Ein Rollator wird bei aufrechtem Gang mit leicht angewinkelten Armen geschoben. Und zwar nicht wie einen Einkaufs- oder Kinderwagen, sondern so, dass man sich darauf abstützen kann.

Gehen

Maximale Sicherheit und optimale Unterstützung: Mit aufrechtem Gang, nach vorne gerichtetem Blick und wenig Abstand zwi-

schen Rollator und Körper gehen. Der Rollator sollte niemals vor sich hergeschoben werden. Dies kann zu Stürzen und Fehlbelastungen führen. Achten Sie darauf, dass der Benutzer/die Benutzerin immer bremsbereit ist.

Sitzen

Überprüfen Sie stets, dass die Rollatorfahrer und -fahrerinnen immer zuerst die Bremsen feststellen, bevor sie sich hinsetzen.

Sonst besteht die Gefahr, dass das Gefährt nach hinten wegrutscht.

Wichtig

Der Rollator ist eine Gehhilfe und darf nur zum Gehen verwendet werden. Die Sitzfläche ist, mit festgestellten Bremsen, zum Sitzen und Ausruhen vorgesehen. Der Rollator darf NICHT als Selbstfahrgelegenheit und NICHT zum Personen- oder Warentransport verwendet werden.

Tipp!

Testen Sie ab und zu die Bremsen Ihrer Rollatoren. Sie sollten so eingestellt sein, dass jederzeit leicht oder stark gebremst werden kann.

Rollatorinstruktion durch Naropa Reha AG

Wir instruieren und schulen Pflegende zu den Themen «Rollator einstellen» und «richtiges Gehen» vor Ort im Heim. Fragen Sie nach unseren Konditionen. Ihre Rollatorfahrer und -fahrerinnen dürfen auch jederzeit bei uns im Geschäft vorbeikommen, um ihre Rollatoren einstellen zu lassen und das richtige Gehen zu üben.



Die passende Höhe einstellen

1. Bitten Sie den Benutzer/die Benutzerin, sich aufrecht hinter den Rollator zu stellen und die Arme locker hängen zu lassen.
2. Stellen Sie nun die Handgriffe auf Handgelenkhöhe ein.
3. Ergreift die Person nun die Handgriffe, sind ihre Ellbogen leicht angewinkelt. Die Schultern dürfen nicht hochgezogen werden.

Als Anhaltspunkt gilt:

Griffhöhe 67–86 cm = Körpergröße 135–170 cm
Griffhöhe 78–100 cm = Körpergröße 150–200 cm



OFFERTE FÜRS BUDGET 2020



Gerne erstellen wir Ihnen schon jetzt eine
Offerte für Ihr Budget 2020; zum Beispiel für Pflegebetten,
Rollstühle, Rollatoren, Matratzen oder andere Hilfsmittel.

REHA-HILFSMITTEL IN DER PRAXIS – 11. SEPTEMBER 2019

ANMELDUNG AB SOFORT AUF INFO@NAROPA-REHA.CH

Zielgruppe: Lernende sowie alle Interessierten in Heimen, bei Spitex und anderen Institutionen

Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, unsere Hilfsmittel selbst auszuprobieren: mit Elektromobil, Elektrorollstuhl, Roll-

stuhl oder Rollator eine Runde drehen, im Elektropflegebett Probe liegen, die verschiedenen Matratzen wie Antidekubitus- oder Wechseldrucksystem testen, den Sitzkomfort der verschiedenen Rollstuhlkissen vergleichen...

AKTIVROLLSTUHLVERSORGUNG

ZUSATZANTRIEB – DIE KRAFT, DIE AUS DEN RÄDERN KOMMT

Ein Zusatzantrieb hält Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer aktiv in Bewegung. Sie bekommen damit genau die richtige Dosis an Kraftunterstützung, um Vitalität und körperliches Wohlbefinden optimal zu fördern und zu erhalten. Die Muskeln und die Gelenke werden geschont.

Zusatzantrieb Wheel Drives mit Dual-Greifreifen

Das duale System mit Assistenz-Greifreifen ermöglicht einen zusätzlichen elektrischen Antrieb. Die Wheel Drives lassen sich praktisch an jeden Leichtgewicht- oder Standard-Rollstuhl montieren. Änderungen am Stuhl oder weitere zusätzliche Teile sind nicht notwendig. Die Räder können jederzeit wieder auf

die ursprünglichen manuellen Räder zurückgewechselt werden – ohne zusätzliches Werkzeug.



E-Motion – Greifreifenantrieb unterstützt die Restkraft

Beim E-Motion-System werden die bestehenden Antriebsräder ersetzt durch Räder mit einem Elektromotor in der Nabe. Sensoren messen den Antriebsimpuls und verstärken ihn bei Bedarf. Die Anschubbewegung des Fahrers/der Fahrerin wird wirkungsvoll unterstützt. Das schont die Kräfte in Schultern und Armen, sodass mit sehr viel weniger Kraft auch wieder längere Strecken oder Steigungen gemeistert werden können.



Kontaktieren Sie Heinz Bänziger, unseren Profi für die Aktivrollstuhlversorgung. Er wird Sie kompetent und «auf Augenhöhe» beraten.

DREI FRAGEN AN: HEINZ BÄNZIGER

ER KANN DIE ANLIEGEN UND WÜNSCHE DER KUNDEN NACHVOLLZIEHEN

Welche Aufgaben hält ein Arbeitstag für Sie bereit?

Ich bin verantwortlich für den Aktivbereich. Das beinhaltet die Beratung und Neuabklärung von hochwertigen Alltags- und Sportrollstühlen sowie Handbikes und anderer Hilfsmittel für vorwiegend selbstständige Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen. Natürlich gehören auch die Wartung, Sonderanfertigungen und das Bestellen von Ersatzteilen und Zubehör dazu.

Was zeichnet Sie persönlich aus?

Ich bin seit 25 Jahren in der Reha-Branche tätig und habe mir in dieser Zeit viel Fachwissen angeeignet. Von grossem Vorteil sind aber sicherlich mein eigenes Handicap (Paraplegiker) und die eigenen Erfahrungen. Dadurch habe ich ein grosses Know-how. Ich kann die Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche meiner Kundinnen und Kunden nachvollziehen und viel Eigenerfahrung einbringen.

Wie schaffen Sie einen Ausgleich zum Berufsalltag?

Im Sommer bin ich oft mit dem Handbike unterwegs. Ich spiele Rollstuhltennis und besuche gerne Musikevents und Open Airs. Im Winter spiele ich Rollstuhlcurling und reise, wenn möglich, an die Wärme.



HERBST AKTION!

PROFITIEREN SIE VON DEN RABATTEN AUF UNSER GESAMTES
ROLLATORENSORTIMENT INKL. ZUBEHÖR

SCHNÄPPCHEN

Jetzt zuschlagen!

Rollatoren

- 1 bis 3 Rollatoren **5% Rabatt**
- 4 bis 8 Rollatoren **10% Rabatt**
- Ab 9 Rollatoren **12% Rabatt**

Fragen Sie uns nach unseren Lieferkonditionen.
Aktion gültig bis 30. November 2019.



Schnäppchen/ Abverkauf

Plattformwaage Univrs PMW 9050 B

ohne Garantie (die Waage ist
NEU und originalverpackt, älter
als 2 Jahre)


Rollstuhlwaage, nicht eichfähig,
zur Gewichtsermittlung, auch
mit Begleitperson, Rollstuhl etc.
Intelligente, softwaregesteuerte
Datenermittlung für einfache
Handhabung mit einer Schnitt-
stelle.

Wiegebereich 2 bis 200 kg
bei 100-Gramm-Teilung.

Fahrbar, mit Transportrollen
kopfseitig, geringes Gewicht

für nur
CHF 990.00

inkl. MwSt.

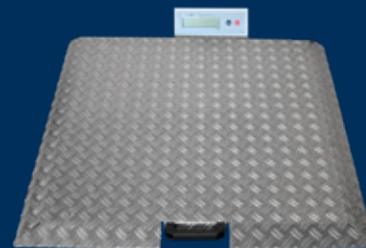

Naropa Reha AG

Hauptstrasse 82a
9422 Staad
T +41 (0)71 845 24 04
info@naropa-reha.ch
www.naropa-reha.ch

SWISS MEDTECH

naropa reha
für ihr wohlbe finden